

K-BLEACH

35%

FICHA

# K-BLEACH 35%

## Drop by drop

Máximo efecto blanqueador sin desperdicios

Blanqueamiento dental de uso clínico a base de peróxido de hidrógeno al 35% con bloqueador de calor para dientes vitales y no vitales.

18

APLICACIONES



INDICADO PARA DIENTES VITALES Y NO VITALES



INHIBIDOR DE CALOR, NO DESHIDRATA.



SESIONES DE 15 MINUTOS CON CAMBIO DE COLOR



### ✓ Bloqueador de calor

El espesante posee bloqueador de calor en su composición para que no el diente no se recaliente en el caso de que se quiera utilizar lámpara (no necesita luz).

### ✓ Sistema de mezcla gota a gota

Permite la dosificación exacta para el número de dientes que se desean blanquear, evitando así el desperdicio de material.

### PRESENTACIÓN:

- 1 bote peróxido de 8,63ml.
- 1 bote de espesante de 3,72ml.
- 1 bote de neutralizante de 1,71ml.
- 1 jeringa de K-Dam de 2 gr con puntas de aplicación.
- 1 espátula.
- 1 placa de mezcla.



KIYOMI  
estética dental

K-BLEACH

35%

- ✓ **Mecanismo de seguridad**  
Cambio de color del gel durante la sesión clínica para mantener un pH estable y evitar la desmineralización del esmalte. Inicialmente el gel es de color púrpura y, pasados unos minutos, cambia a color verde.
- ✓ **Excelente viscosidad**  
Aplicaciones seguras sin que el gel se escurra por zonas no deseadas.
- ✓ **Seguridad garantizada**  
Máximo control del pH para evitar desmineralizaciones del esmalte.
- ✓ **Dosificación exacta**  
Ahorro de gel en cada tratamiento gracias al sistema de mezcla de gota a gota que permite la dosificación exacta sin desperdicios.
- ✓ **Aplicación del gel con ayuda de una espátula o pincel.**



KIYOMI  
estética dental